



GoldLine
by Condor[®]

NEUROCHIRURGIE: THORAKALER ZUGANG – BWS

Mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®] bieten wir für neurochirurgische Eingriffe an der Brustwirbelsäule optimale OP-Voraussetzungen, die zudem größte Flexibilität garantieren.


Mit GoldLine by Condor[®] für den thorakalen Zugang in der Wirbelsäulenchirurgie setzt Condor[®] neue Maßstäbe. Es bietet eine einzigartige Kombination aus Zugvorrichtung und Retraktorsystem. Das Ergebnis: ein Plus an Flexibilität bei gleichzeitig weniger Platzbedarf und reduzierten Kosten.

Die 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken erweist sich gerade beim thorakalen Zugang als große Erleichterung. Die Haltearme können

barrierefrei eingestellt und positioniert werden. Mit den speziellen Zugvorrichtungen, die an den Haltearmen fixiert werden, lassen sich die Rippen und die Scapula mithilfe der Feinjustierung ohne große Kraftaufwendung spreizen. Durch die Feinjustierung haben Sie die Rippen permanent im Blick und beugen so möglichen Frakturen vor. Zusätzliche Wundhaken können jederzeit mit den patentierten Blatthaltern mit Spitzebetonung angebracht werden.

Besondere Vorteile:

- anwenderfreundlich
- störungsfreies Arbeiten
- 3D-Einstellung mit Kugelgelenken
- stabile und sichere Einstellung
- Zugvorrichtung für die Rippen
- transluzente Wundhaken aus Aluminium
- spitzebetonte Blatthalter

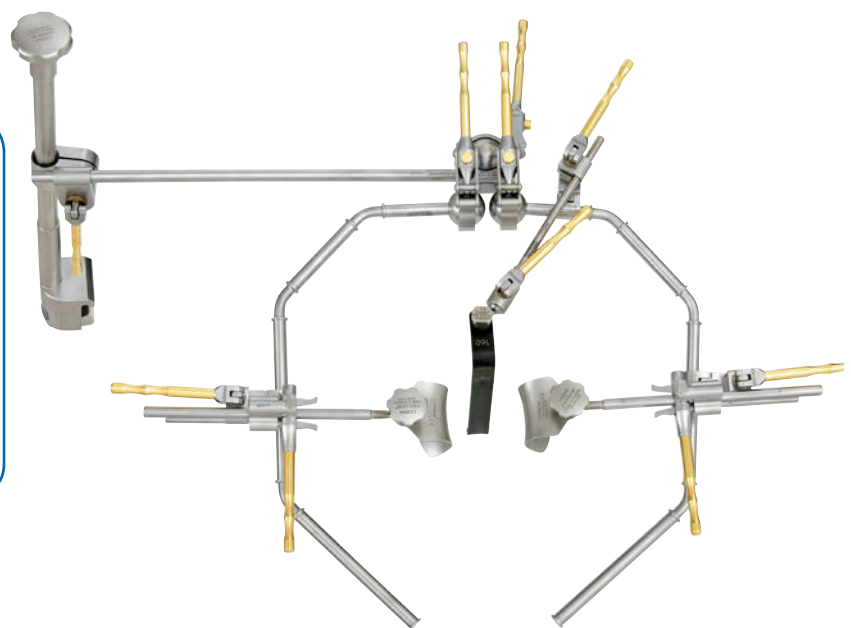

GoldLine by Condor® für den Neurochirurgen

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Neurochirurgie bieten wir Ihnen für Ihre Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Chirurgie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist. Wir legen sehr viel Wert auf Systeme, die in der Praxis entwickelt wurden und sich dadurch bewährt haben. Hervorzuheben ist das einfache und schnelle Handling mit Schnellverschlüssen. Dank der 3D-Einstellung mit den Kugelgelenken können Sie sich das System barrierefrei einstellen.

Für die Neurochirurgie sind folgende Sets des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor® erhältlich:

- Cervikaler Zugang bei der HWS
- Ventraler Zugang bei der LWS
- **Thorakaler Zugang bei der BWS**

Das Wund-Spreizer-System GoldLine für den thorakalen Zugang bei der BWS ist ein offenes System, das besonders für die Seitenlagerung geeignet ist. Auch eine perfekte 3D-Einstellung ist möglich. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Patentierte Blatthalter gewährleisten eine optimale Einstellung in der Tiefe – spitzebetont.

Weiterer Vorteil:

Die integrierte Isolierung im Zentralhalter schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus.

Setvorschlag: Thorakaler Zugang – BWS

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	4
100.360.040 OT	Haltearm für Orthopädie mit Kugel	2
140.260.400 TX	Zugvorrichtung	2
100.050.012 DC	Klammer Double Click	2
114.040.050 B	Kirschner WH, Blatt	2
132.052.064 B	Kelly WH	2
115.200.008 EAL	Blatthalter mit Kugelgelenk, Exzenterverschluss und Kopfschraube für Wundhaken transluzent	4
122.020.100	Steckschlüssel 20 mm/100 mm	1
120.020.080 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/80 mm	2
120.020.100 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/100 mm	2
120.020.120 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/120 mm	4
120.020.140 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/140 mm	4
120.020.160 AL	Wundhaken transluzent, Blatt 20 mm/160 mm	4
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugelverschluss u. Knebelöffnung für Orthopädie	2
115.030.020	Adapter für vorhandene Hohmann-Wundhaken	2

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Neurochirurgie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!

Condor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Condor® GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Condor® GmbH

Dr.-Krismann-Str. 15 | 33154 Salzkotten | Germany
Telefon: +49 5258 9916-0 | Telefax: +49 5258 9916-16
E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de