



GoldLine
by Condor[®]

ORTHOPÄDIE: ENDOPROTHETIK KNIE

Flexibilität wird groß geschrieben beim Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor[®]. Profitieren Sie auch bei der Endoprothetik am Knie von der praktischen Handhabung sowie von der deutlichen Prozessoptimierung beim Einsatz von GoldLine.

Das GoldLine System für die Endoprothetik am Knie zeichnet sich durch überzeugende Leistungs- und Funktionsmerkmale aus. Bei der Endoprothetik am Knie wird das Bein häufig durchbewegt. Deshalb muss sich auch ein Retraktorsystem auf diese Situation einstellen. Das einfache und flexible Handling des Wund-Spreizer-Systems trägt diesem Faktor Rechenschaft. Mithilfe der 3D-Einstellung der Kugelgelenke und einem nach unten offenen Aufbau ist die Beweglichkeit des Beines in keiner Weise eingeschränkt. Die schnelle und flexible Adaption der Knochenhebel mit Kugeladaptern

garantiert ein barrierefreies Arbeiten. Dank eines Hebelmechanismus lassen sich die Knochenhebel mit einer Hand lösen und neu positionieren.

Durch die Fixierung aller Knochenhebel mit Kugeladaptern haben Sie die Hände frei und können sich ganz dem Operationsverlauf widmen – entweder als Operateur selbst oder indem Sie Ihr Personal anlernen.

Die Vorteile des GoldLine Wund-Spreizer-Systems für die Endoprothetik am Knie im Überblick:

- flexibler, offener Aufbau
- völlige Beinfreiheit
- Kugeladapter für vorhandene Hohmann-Knochenhebel
- "Einhand"-Bedienung der Schnellverschlüsse
- keine Beeinträchtigung bei der Anwendung von Navigationssystemen
- effizienter Personaleinsatz
- Förderung der Ausbildung



GoldLine by Condor® für die Orthopädie

Präzisionsarbeit im OP ist das A und O – mit dem patentierten Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® für die Orthopädie bieten wir Ihnen für Ihre Eingriffe die perfekte Unterstützung. Wir kombinieren praxisorientiertes Know-how, langjährige Erfahrung, innovative Technik und Qualitätsarbeit "Made in Germany". Das Ergebnis: ein OP-Instrument für die Orthopädie, das sich mit seinen multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten gegenüber herkömmlichen Systemen als wesentlich flexibler und effizienter erweist.

Wir legen sehr viel Wert auf Systeme, die in der Praxis entwickelt wurden und sich bewährt haben. Hervorzuheben ist das einfache und schnelle Handling mit Schnellverschlüssen.

Für die Endoprothetik sind folgende Sets der GoldLine Wund-Spreizer-Systeme erhältlich. Stellen Sie sich hieraus Ihr maßgeschneidertes OP-Set zusammen.

Endoprothetik

> Hüfte

- Zusatz Beinhalterung

> **Knie**

> Schulter

Flexibilität dank Modularität

Das Endoprothetik-Set ist sowohl auf Knie- als auch auf Hüft-Endoprothetik ausgerichtet. Beide Operationen lassen sich problemlos mit dem Wund-Spreizer-System durchführen.

Vorteile des Endoprothetik-Sets, die für Knie- und Hüft- Operationen gleichermaßen gelten: Dank der Kugeladapter können Sie Ihre vorhandenen Hohmann-Knochenhebel weiterhin nutzen. Diese flexible Einstellung an jeder Situsposition ist in dieser Form nur mit diesen Kugeladaptern realisierbar. Ein weiterer Vorteil: Die Kugeladapter verfügen über einen Schnellverschluss, der bewusst über eine Hebel-Funktion geöffnet werden kann – das spart Zeit, erleichtert das Handling und ist ein weiterer Garant für die bestmögliche, flexible Einstellung. Gleichzeitig wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Kugeladapter verhindert. Selbst bei Einsatz eines Navigationssystems beeinträchtigt das Condor® Wund-Spreizer-System GoldLine nicht.

Setvorschlag: Endoprothetik Knie

Artikel	Beschreibung	Anzahl
100.060.060 E	Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung	1
100.440.040 K	Querstange mit Kugel	1
100.170.080 K	Aufnahme	1
100.050.020 ES	Condor® Universal Klammer "SOFT" mit Exzenterverschluss	3
100.360.040 OT	Haltearm für Orthopädie mit Kugel	2
115.200.008 OT	Blatthalter mit Kugelverschluss u. Knebelöffnung für Orthopädie	3
115.030.020	Adapter für vorhandene Hohmann-Wundhaken	4

Lernen Sie GoldLine by Condor® für die Orthopädie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer unverbindlichen Leihstellung. Beim Ersteintritt steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!